

Das Abnahmekit

Jedes Abnahmekit enthält:

- Anforderungsformular
- Barcode-Karte
- 2 Blutentnahmeröhrchen
- Biohazard-Tüte mit Saugvlies
- Gel-Pack
- silberfarbene Isolierhülle



Abnahmekit

Schritt 1: Beschriftung und Anbringung der Barcode-Kleber

- ! Bitte die Anweisungen für die Beschriftung des Anforderungsscheins und der Proben beachten.
- ! Nicht korrekt beschriftete Aufträge können eventuell nicht bearbeitet werden.


1 Verwenden Sie jeweils ein Abnahmekit pro Patientin. Nehmen Sie die Barcode-Karte aus dem Abnahmekit. Die Auftragsnummern der Barcodes müssen übereinstimmen. Mischen Sie keine Barcode-Kleber verschiedener Barcode-Karten.

2 Beschriften Sie alle Barcode-Kleber mit dem vollständigen Namen und dem Geburtsdatum der Patientin.

3 Kleben Sie den beschrifteten orangenen Barcode-Kleber in das dafür vorgesehene Feld des Anforderungsscheins.

4 Prüfen Sie das Verfallsdatum der Blutentnahmeröhrchen. Kleben Sie die beschrifteten gelben Barcode-Kleber längs auf die Blutentnahmeröhrchen.

5 Nur anzuwenden, wenn der Harmony® Test Kassenleistung ist: Kleben Sie den grauen Barcode-Kleber für gesetzlich versicherte Patientinnen auf den M10-Schein und legen Sie diesen ausgefüllt dem Abnahmekit bei. Für Privatpatientinnen entfällt dieser Schritt.

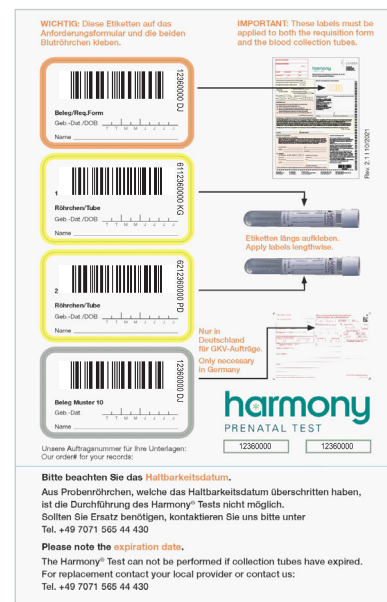

Barcode-Karte


Schritt 2: Ausfüllen des Anforderungsscheins

Füllen Sie bitte alle Felder vollständig aus.

Alle Einsenderinformationen sind erforderlich.

Die Patientin muss alle Angaben lesen und an den vorgesehenen Stellen unterschreiben.

Geben Sie bei IVF-Schwangerschaft ggf. die Eizellspende und das Alter der Eizellspenderin an.

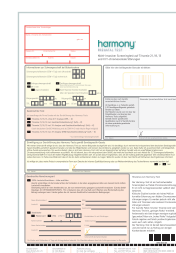

Anforderungsschein

Schritt 3: Probenentnahme

- ! **Verwenden Sie ausschließlich die beschrifteten Blutentnahmeröhrchen aus Schritt 1.**
- 1 Füllen Sie die beschrifteten Blutentnahmeröhrchen vollständig mit Vollblut.
- 2 Schwenken Sie die Blutentnahmeröhrchen vorsichtig fünf Mal.
- 3 Prüfen Sie, ob das korrekte Blutentnahmedatum auf dem Anforderungsschein eingetragen ist.
- 4 Lagern Sie die Röhrchen nach Blutentnahme bis zum Versand bei Raumtemperatur. Keine Kühlung erforderlich, nicht zentrifugieren.

Schritt 4: Verpacken und Versand

- ! **Abnahmekit und Blutproben immer bei Raumtemperatur lagern.**
- **Ein Abnahmekit pro Patientin verwenden.**

Prüfen Sie vor dem Verpacken nochmals die Patientendaten:

- Stimmen Barcode des Anforderungsscheins und Barcode des Blutentnahmeröhrchens überein?
- Stimmen Patientename und Geburtsdatum auf Anforderungsschein und Blutentnahmeröhrchen überein?
- Sind alle Felder vollständig ausgefüllt?

Korrigieren Sie Abweichungen bitte vor dem Verpacken und fahren Sie, wie folgt, fort:

- 1 Legen Sie den zugehörigen Anforderungsschein auf den Boden des Abnahmekits. Sobald der Harmony® Test Kassenleistung ist, legen Sie bitte für Kassenpatientinnen zusätzlich den ausgefüllten M10-Schein bei.
- 2 Geben Sie die korrekt beschrifteten und gefüllten Blutentnahmeröhrchen in die Biohazard-Tüte mit dem Saugvlies.
- 3 Umwickeln Sie die Biohazard-Tüte mit dem Gel-Pack.
- 4 Geben Sie alles in die silberfarbene Isolierhülle und verschließen Sie diese.
- 5 Versenden Sie die Proben möglichst am Tag der Blutentnahme.

Für weitere Fragen zur Probeneinsendung steht Ihnen unser Team gerne unter der Telefonnummer 07071 565 44 430 zur Verfügung.